

# Anleitung zur eigenen Haarprobenentnahme von Pferden

In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie eine korrekte Haarprobe zur Gewinnung der DNA des Pferdes erhalten. Das KFPS sendet diese Haarprobe an seinen Partner Neogen, mit dem es über den GGP Equine 70K-Chip die DNA bestimmen kann.


Erforderlich: Umschlag, Papier, Stift, Schere und Klebeband oder ein Gummiband



- 1** Stellen Sie sicher, dass die Haare frei von Schmutz sind und greifen Sie zu einer Strähne mit mindestens 30 Haaren. Am besten von der Unterseite des Mähnenkamms, damit die Mähne schön voll bleibt.



- 2** Ziehen Sie die Haare aus der Mähne (schneiden Sie sie nicht ab), sodass Sie die Haare mit den Wurzeln erhalten. Die Haarwurzeln enthalten die DNA und müssen für den Test intakt und deutlich sichtbar sein.

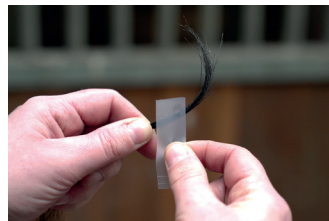

- 3** Achten Sie darauf, dass die Haarprobe kompakt bleibt. Legen Sie dazu ein Klebeband oder Gummiband um die Haarprobe. Achten Sie darauf, dass die Haare auch auf gleicher Höhe bleiben, damit die Haarwurzeln zusammen bleiben.



- 4** Schneiden Sie die Haarspitzen ab. Achten Sie darauf, die Haare auf der richtigen Seite zu schneiden, damit die Haarwurzeln nicht entfernt werden.



- 5** Notieren (oder tippen) Sie den Namen und die Registrierungs- oder Chipnummer des Pferdes auf Papier.

Fassen Sie die Haarprobe mit den Angaben zum Pferd in einem Umschlag zusammen und senden Sie ihn an das KFPS-Stammbuchkantor, z. Hd.: Eveline van Kooten.  
Adresse: Lavendelheide 13,  
NL- 9202 PD Drachten.