

Instructies voor eigen haarmonsterafname bij paarden

In deze instructie wordt uitgelegd hoe u een correct haarmonster kunt verkrijgen om het DNA van het paard te kunnen verzamelen. Het KFPS stuurt dit haarmonster op naar haar partner Neogen, waarmee zij via de GGP Equine 70K chip het DNA kan vaststellen.


Benodigheden: Enveloppe, papier, pen, schaar en plakband of een elastiekje



- 1 Zorg dat het haar vrij is van vuil en pak een pluk manen van minimaal 30 haren. Bij voorkeur vanuit de onderkant van de manenkam zodat de manen mooi vol blijven.



- 2 Trek (niet knippen) het haar uit de manen, zodat u het haar met de haarwortels verkrijgt. De haarwortels bevatten het DNA en moeten intact en goed zichtbaar zijn voor het testen.

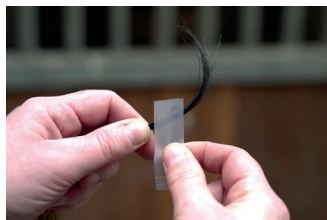

- 3 Zorg ervoor dat het haarmonster compact blijft. Plaats hiervoor een plakbandje of elastiekje om het haarmonster. Zorg ervoor dat de haren ook op gelijke hoogte blijven zodat de haarwortels bij elkaar blijven zitten.



- 4 Knip het uiteinde van de haren af. Let goed op dat u de haren aan de goede kant afknijpt, zodat de haarwortels niet verwijderd worden.



- 5 Schrijf (of typ) op papier de naam en het registratie- of chipnummer van het paard op.

Voeg het haarmonster samen met de gegevens van het paard in een enveloppe en stuur dit op naar het KFPS Stamboekkantoor t.a.v. Eveline van Kooten. Adres: Lavendelheide 13, 9202 PD Drachten.